


# INSTRUCCIONES

## MASCARILLAS CON ELÁSTICO

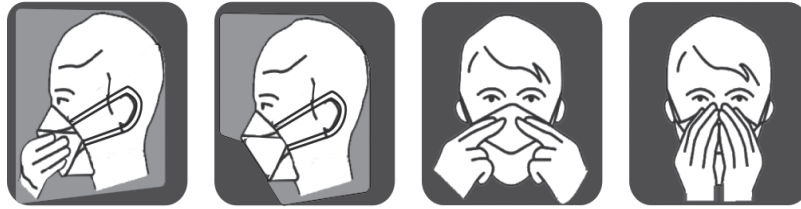

1. Colocar la mascarilla debajo de la barbilla y pasar las dos bandas por encima de las orejas

2. Moldear el clip nasal y fijar la posición para cubrir nariz y barbilla

3. Manipular el clip nasal con las dos manos para que se ajuste a la forma de la nariz

4. Comprobar la mascarilla sujetándola con ambas manos y exhalar fuerte. La mascarilla debe abombarse.

\*Si la mascarilla presenta manchas, moho, humedad, debido a un almacenamiento inapropiado, por favor, deséchela.

## MASCARILLAS CON CINTAS



1. Colocar la mascarilla debajo de la barbilla y pasar las dos cintas elásticas por detrás de la cabeza

2. Moldear el clip nasal y fijar la posición para cubrir nariz y barbilla

3. Manipular el clip nasal con las dos manos para que se ajuste a la forma de la nariz

4. Comprobar la mascarilla sujetándola con ambas manos y exhalar fuerte. La mascarilla debe abombarse.

\*Si la mascarilla presenta manchas, moho, humedad, debido a un almacenamiento inapropiado, por favor, deséchela.

### Advertencia

Lavar las manos antes de utilizar este producto.

No utilizar si el paquete está sucio o en malas condiciones.

No lavar el producto.

Condiciones de almacenamiento: Ver embalaje